

評分指引：氧氣供氣系統（ORS）、抽液器、膠囊及面罩復甦器

氧氣供氣系統（ORS）、抽液器、膠囊及面罩復甦器 評分指引

評估項目		得分	備註
甲：ORS 氧氣供氣系統 總分：7 分			
1.	正確地開啟氧氣樽 確定氧氣樽現存氣量	0	不認識操作方法
		1	打開主氣閥無閱讀氣存量表
		1	打開主氣閥及閱讀氣存量表
		0	不認識操作方法
2.	正確地連接供氣喉管及面罩	1	供氣喉管接到氧氣樽供氣咀
		0	不認識操作方法
3.	正確地給傷病者帶上面罩	1	非 AMS 教授的手勢
		2	AMS 教授的手勢
		0	6L 以下或 10L 以上
4.	調校正確的供氣流量	1	6L 以上
		2	10L 正
		乙：抽液器 總分：8 分	
1.	正確地連接喉管及抽液器 / 組合抽液器	0	不認識操作方法
		1	不熟練，但仍可完成
		2	快速及熟練地完成
2.	將抽吸導管接駁上抽液器	0	不認識操作方法
		1	不熟練，但仍可完成
		2	快速及熟練地完成
3.	將導管放入傷病者的口腔內	0	強行將導管放入口腔
		1	Cross Finger 法張開口腔
4.	按壓手動制，進行抽吸，唯不能多於 20 秒	1	從口角放入導管
		0	不認識操作方法
		1	操作正確
		1	操作 20 秒或口述 20 秒

KAN-氧氣供氣系統（ORS）、抽液器、膠囊及面罩復甦器的使用評分指引-20020825E 版 1-(1/2)

丙：配合膠囊及面罩復甦器進行灌氣		總分 35 分	備註
1.	將合適的面罩正確連接膠囊之出氣口上 (組合膠囊及面罩復甦器再連接氧氣喉)	0	不認識組合方法
		1	連接面罩
		1	連接氧氣貯存袋
		1	連接氧氣喉
2.	雙膝跪於傷病者頭頂位置	0	位置不正確
		1	頭部側面
		2	頭頂位置
3.	正確地量度人工氣喉的長度 (正確地選擇適合長度的口咽氣喉-OPA)	0	不認識選擇方法
		1	不量度但氣喉長度適當
		2	用其他量度法選取
		3	口角至顎角量度法選取
4.	正確地導入人工氣喉(口咽氣喉-OPA)	0	不認識導入方法
		1	Cross Finger 法張開口腔
		1	向上顎導入人工氣喉
		1	180°轉再導入剩餘部份
5.	開啟氧氣樽進行輸氣	0	不認識操作方法
		1	打開主氣閥
		1	閱讀氣存量表
		1	觀察氧氣貯存袋已充氣
6.	正確使用 EC 手勢將面罩密封傷病者的口鼻	0	不認識操作方法
		2	正確使用 EC 手勢把持面罩
		2	面罩先閉下頷再閉鼻樑
		2	正確地把持及擠壓氣袋
7.	正確地去進行灌氣一分鐘 ◇ 擠壓氣袋二秒 放鬆氣袋二秒、暫停一秒 ◇ 一分鐘內灌氣十二次	0	不認識操作方法
		2	不依步驟地灌氣一分鐘
		4	依步驟未能完成十二次灌氣但不少於十次
		6	依步驟地完成十二次灌氣
8.	留意傷病者胸部是否有起伏，以確保灌氣有效	0	胸部完全沒有起伏
		2	面罩漏氣但胸部仍有起伏
		3	面罩沒有漏氣胸部有起伏
9.	有次序及熟練地完成以上操作程序	0	不認識操作程序
		1	操作程序正確，但不熟練
		2	熟練及正確地操作
在限時內完成評估內容		4	時限為八分鐘

KAN-氧氣供氣系統（ORS）、抽液器、膠囊及面罩復甦器的使用評分指引-20020825E 版 1-(2/2)

Kan-AMS-年試評分指引-ORS/抽液器 / BVM -20020828